



# Guía de inicio rápido

Tensiómetro LTE

**PYLO 802-LTE**

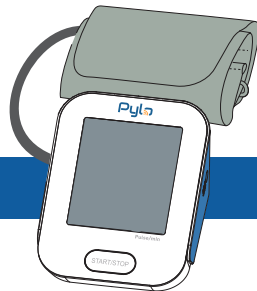


**1**

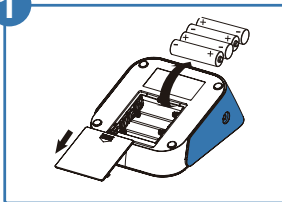

Inserte las 4 baterías tipo AA incluidas con el dispositivo.

Una vez puestas las baterías, el dispositivo iniciará el emparejamiento inicial seguro con la red móvil.


**2**

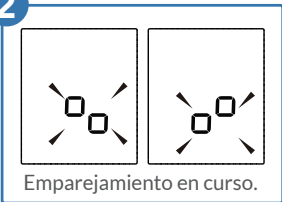

Emparejamiento en curso.

Durante el emparejamiento, se mostrarán los símbolos  $\square_{\square}$  y  $\square^{\square}$ . Este proceso suele durar unos 10 segundos, pero puede tardar hasta un minuto si la señal es débil.

**3**

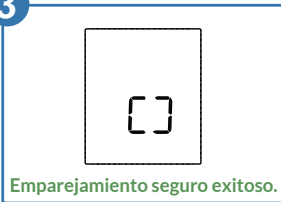

Emparejamiento seguro exitoso.


Cuando el emparejamiento se haya completado con éxito, se mostrará el símbolo  $\square_{\square}$  y la pantalla se apagará.

¡El dispositivo ya está listo para su uso!


**4**




Conecte el tubo del brazalete en el dispositivo. Asegúrese de utilizar el puerto etiquetado como "Cuff Port" ("puerto del brazalete") y no el puerto del adaptador de corriente opcional.

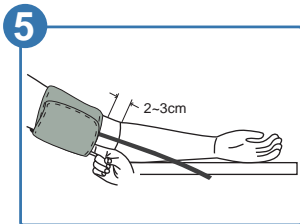


Envuelva el brazalete alrededor de su brazo y posícelo antes de apretarlo. Asegúrese de leer y seguir la guía de "cómo tomar su presión" que se incluye con el monitor.

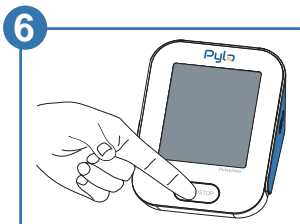


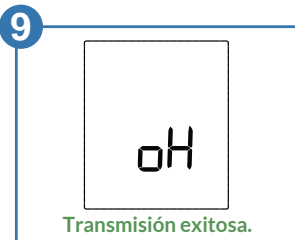
Pulse el botón de inicio/detener ("START/STOP") para encender el monitor. El brazalete se inflará, tomará la lectura y luego se desinflará. Permanezca inmóvil hasta que el brazalete se haya desinflado por completo.

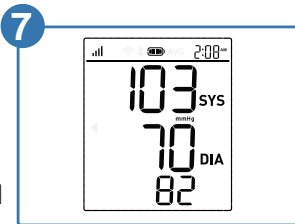

Sus resultados se mostrarán y se guardarán en el dispositivo antes de iniciar la transmisión.

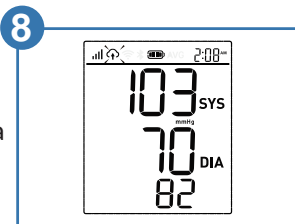

Durante la transmisión de datos, aparecerá el símbolo . Este proceso suele durar unos 10 segundos, pero puede tardar más si la señal es débil.



Si la transmisión es exitosa, se mostrará el símbolo .

Si la conexión falla, se mostrará E5 o E6. En este caso, la medición se guardará y se enviará durante la siguiente conexión exitosa.



Para más información, consulte el manual de instrucciones completo.

